


Bedienung des Rufempfänger RCL07-B01

RCL07-B01 sind Rufempfänger mit Anschluss an die Rufanlage

Sie können mit allen mit Easywave Sendern ausgestatteten Geräten arbeiten:
 Sensormatten, Bewegungsmelder, Bettfluchtbügel, Armband-/Halsband-Sender,
 Notrufkissen, Großruftaster, Daza Bewegungsmelder, usw.

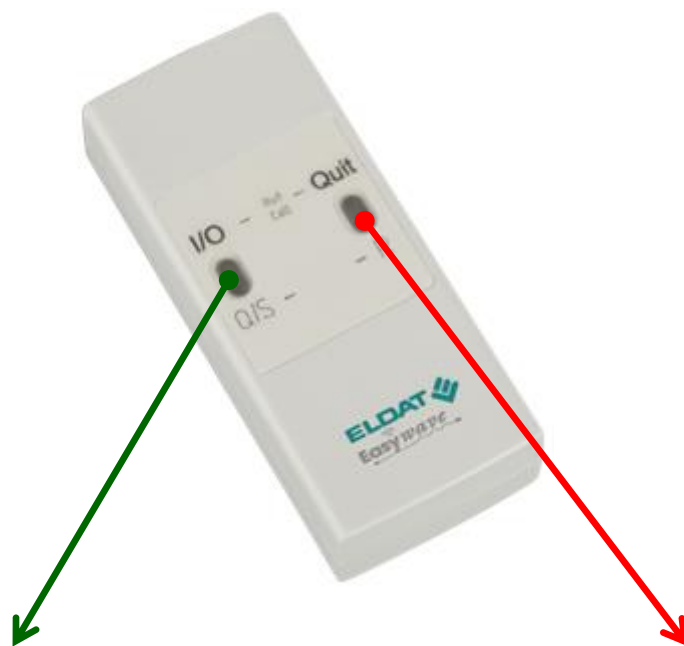

LED leuchtet grün = betriebsbereit

Pflegefunktion:

Die Schalttaste ca. 10 Sekunden lang drücken –
 das Gerät ist nun deaktiviert/ausgeschaltet,

die grüne LED blinkt

Nach 15 Minuten schaltet sich das Gerät
 automatisch wieder auf Rufempfang!

Um den Rufempfang vorher zu aktivieren, die
 Schalttaste wieder 10 Sekunden drücken

Pflegefunktion:

Bei Auslösung eines Rufes **leuchtet die LED rot**
 (Dauerleuchten) bis diese Taste am Gerät quittiert
 wird. **Taste kurz einmal drücken zum Quittieren**

ACHTUNG: Wird die Taste zu lange oder ein 2. Mal
 gedrückt, geht das Gerät in den Programmier-
 Modus!!!

LED blinkt rot = Sender-Batterie schwach

Die Batterie in Sensormatte, Bettfluchtbügel,
 Arbandsender, Notrufkissen, usw. muss in Kürze
 getauscht werden

ACHTUNG: Alarme an die Rufanlage müssen immer direkt am Rufempfänger quittiert werden!